

[仕様]

小児用 ■ファイコンTCB気管支ブロック Type-S (ファイコンTCB気管支ブロック、シーベルコネクタのセット品)

製品番号	サイズ (シャフト外径)	全長	有効長*1	最大カプ容量*2	包装単位
0203103	1.7 mm (5 Fr)	505 mm	325 mm	3 mL	1セット/箱

滅菌済 単回使用


成人用 ■ファイコンTCB気管支ブロック Type-S (ファイコンTCB気管支ブロック、シーベルコネクタのセット品)

製品番号	サイズ (シャフト外径)	全長	有効長*1	最大カプ容量*2	包装単位
0203105	3.0 mm (9 Fr)	675 mm	510 mm	8 mL	1セット/箱

滅菌済 単回使用

※1 有効長はシーベルコネクタをセットした状態で先端部から気管内チューブ接続部までの最長値です。※2 最大カプ容量は使用時の注入量ではありません。数値はすべて近似値です。

[各部名称]

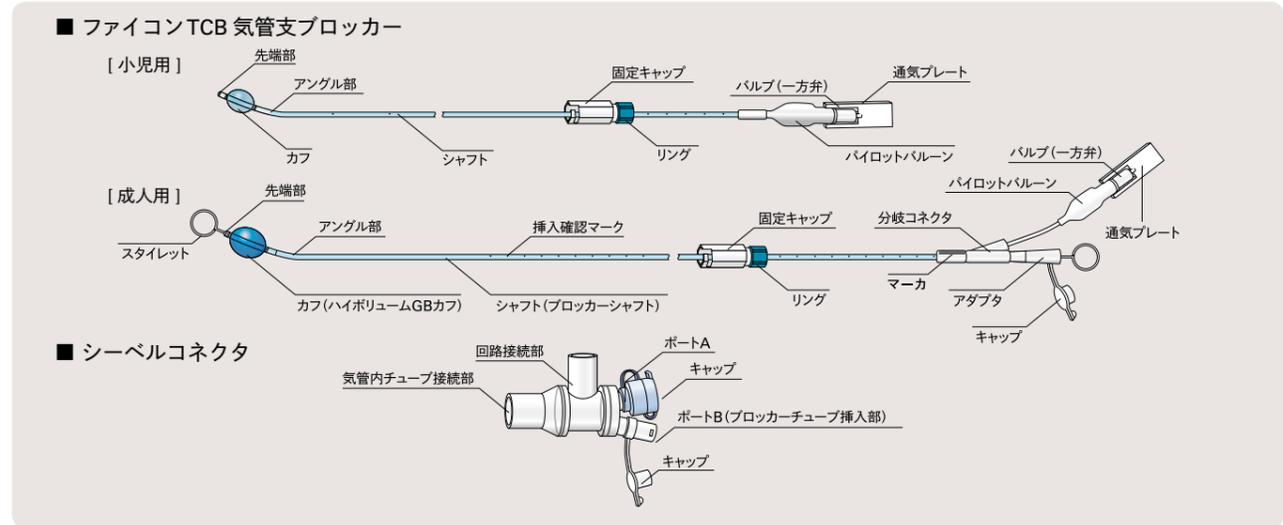

TCB BRONCHIAL BLOCKER

ファイコンTCB気管支ブロック



販売名：ファイコンTCB気管支ブロック
 一般的名称：換気用気管支閉塞カテーテル
 クラス分類：管理医療機器
 医療機器認証番号：223ADBZX00078000

※使用上の注意に関しては、右記QRコードより電子添文にてご確認ください。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



発売元
富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>



本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5
 広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区祇園町1-40

TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907
 TEL (011) 211-0751 FAX (011) 211-0783
 TEL (022) 748-4201 FAX (022) 748-4204
 TEL (048) 729-6480 FAX (048) 644-9004
 TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907
 TEL (052) 265-9221 FAX (052) 265-9225
 TEL (06) 6943-8404 FAX (06) 6943-1425
 TEL (082) 555-8091 FAX (082) 227-4255
 TEL (092) 262-6777 FAX (092) 262-6770

代理店



柔軟な高トルク性ブロッカーシャフト（金属メッシュ入り）により、左右気管支挿入時の操作性が向上しました。

小児用

成人用


■ハイボリューム GB カフ 成人用

柔らかい特殊なシリコン製ハイボリューム GB カフの採用で、従来のシリコン製カフの特性を生かしたままガス透過性の改良を行い、エアージェットを減少させることに成功しました。

（下グラフ参照）

バルーンの色も、あざやかな青色とすることで視認性を高めています。



シリコン製ハイボリューム GB カフは成人用のみの採用となります。

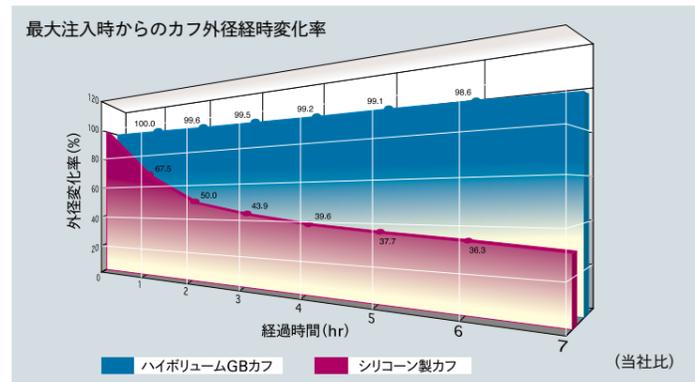

■TCB ブロッカーチューブ 小児用 成人用

高トルクのブロッカーシャフト（金属メッシュ入り）の採用により、トルクコントロールが向上しました。また、X線透視下での位置確認にも適しています。

フレキシブルなトルクコントロール

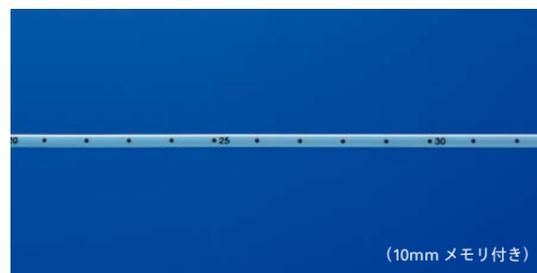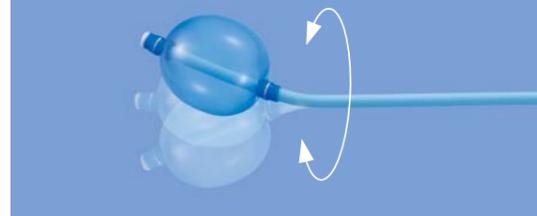

■シーベルコネクタ 小児用 成人用

回路接続部を簡単に回転できる可動型シーベルコネクタ（分離タイプ）を装備。麻酔回路との接続後に位置や角度のずれが生じて、ブロッカーチューブにかかるトルクを軽減します。



使用目的

胸部外科領域における各種気管チューブと組み合わせ、左右気管支の選択的ブロックによる分離肺換気を目的に使用します。

一般的なご使用方法

経口、経鼻よりすでに挿入されている各種気管チューブなどを經由して、左右気管支の目的とする部位でカフを空気で膨張させ、気管支をブロックした後に分離肺換気を行ってください。

■挿入の目安となる手元のマーカ 小児用 成人用

カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけました。

