

シルバーCAPDカテーテル抗菌試験


各種起因菌の抗菌試験

銀系無機抗菌剤を添加したシリコンゴムは、カテーテル関連感染症の主な起因菌に対して高い抗菌活性があり、感染リスク低減に有効な抗菌作用が確認できます。但し、バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE) に対しては、抗菌効果が弱いことが確認されています。

〔試験結果 カテーテル関連感染症の起因菌に対する抗菌試験結果〕

菌種	抗菌活性値	菌種	抗菌活性値
表皮ブドウ球菌	3.2	大腸菌	3.5
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	2.9 以上	緑膿菌	5.3 以上
黄色ブドウ球菌	2.7	エンテロバクター	5.6 以上
連鎖球菌	3.7 以上	アシネトバクター	6.4 以上
コリネバクテリウム	4.5 以上	セラチア	4.1 以上
肺炎かん菌 (クレブシエラ)	4.5 以上	バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE)	0.3

接種24時間後の培養写真

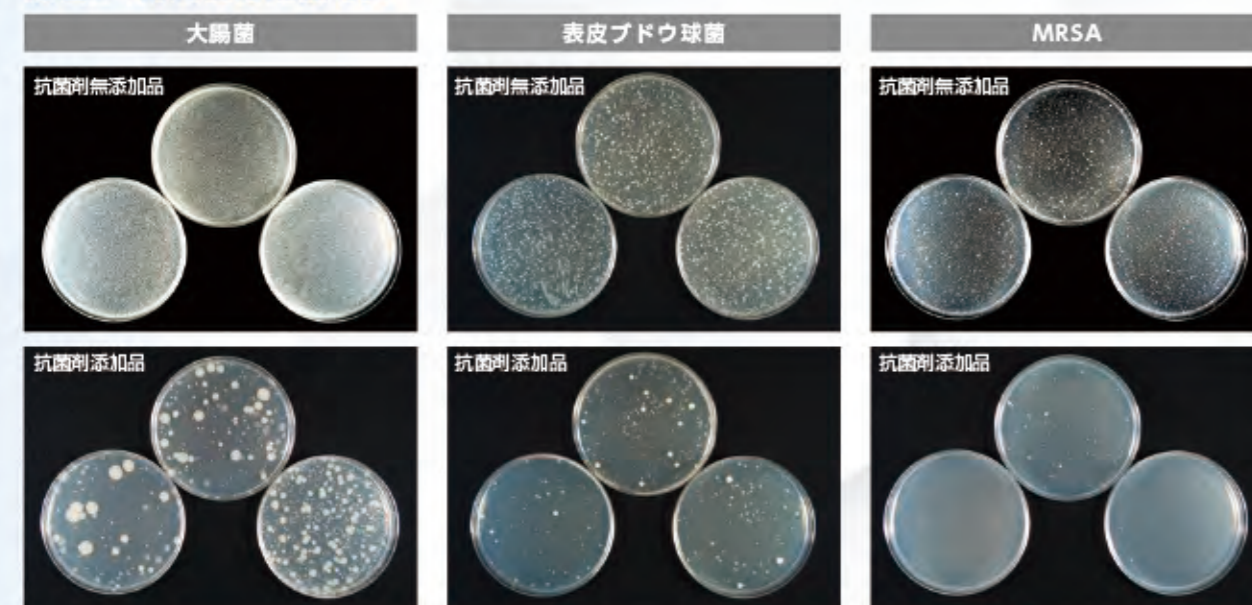

※抗菌活性値が 2.0 以上で抗菌効果がある。
 ※JIS Z 2801: 2010 「抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果」
 ※試験実施施設：一般社団法人 日本食品分析センター

製造後長期間経過した製品に対する抗菌試験

製造後 9 年を経過したシリコンゴムは、十分な抗菌性能を有しており、長期間の抗菌作用が確認できる。

〈試験結果〉

試験菌	抗菌活性値
黄色ブドウ球菌	4.4 以上
大腸菌	4.4 以上


販売名：シルバーCAPDカテーテル 一般的名称：腹膜透析用カテーテル
 クラス分類：クラスⅡ(高度管理医療機器) 医療機器承認番号：22900BZX00049000

※本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により予告なく変更することがありますのでご了承ください。



発売元
 富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14 TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2 TEL(011)211-0751 FAX(011)211-0783
 仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1 TEL(022)748-4201 FAX(022)748-4204
 大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2 TEL(048)729-6480 FAX(048)644-9004
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14 TEL(03)5689-1901 FAX(03)5689-1907
 名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6 TEL(052)265-9221 FAX(052)265-9225
 大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5 TEL(06)6943-8404 FAX(06)6943-1425
 広島支店 〒730-0015 広島市中区本町10-10 TEL(082)555-8091 FAX(082)227-4255
 福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区冠木町1-40 TEL(092)262-6777 FAX(092)262-6770

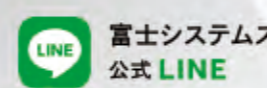

販売元



腹膜透析用カテーテル
シルバーCAPDカテーテル




感染対策の1つのデバイスとして

腹膜透析用カテーテル*シルバー CAPD カテーテル*は、特殊技術で銀系無機抗菌剤を添加しているため、
組織や溶液中に抗菌剤が溶出することはほとんどなく、抗菌作用が長期的に持続します。
また、製品全体(カテーテル本体チューブ及びカフ)を抗菌化しているため、出口部・皮下トンネルにおける
カテーテル関連感染症のリスクを低減させる効果が期待されます。

皮下に設置する抗菌剤添加カフ




X線透視時の写真

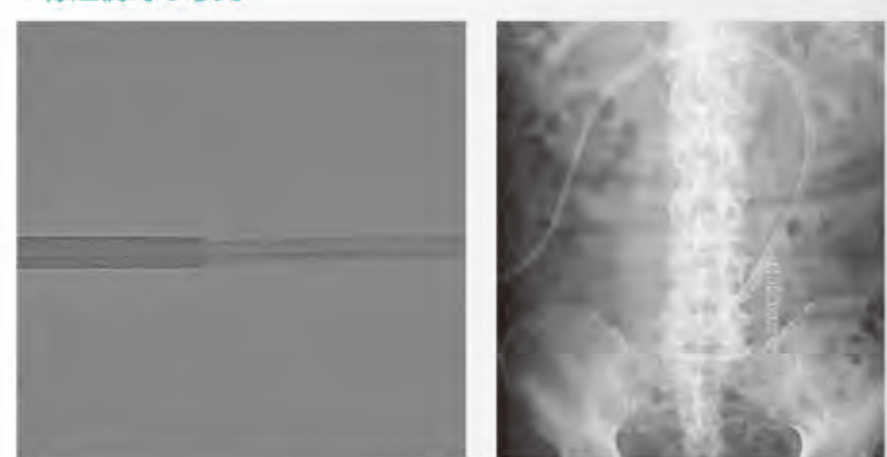


スワンネック型(逆U字)


製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217001	FS5A スワンネック仙台型1	435mm	逆U字	有

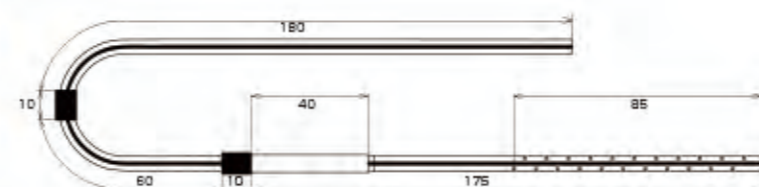


製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217002	FS6A スワンネック仙台型2	400mm	逆U字	有

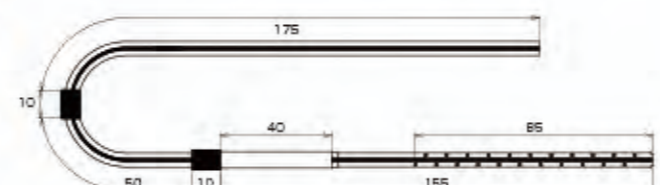

製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217003	FS5A G	510mm	逆U字	有

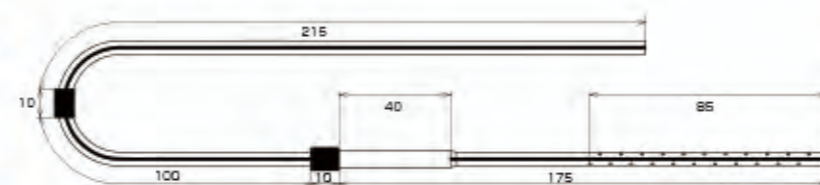


製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217004	FS5A 補強部85K-HK	470mm	逆U字	有

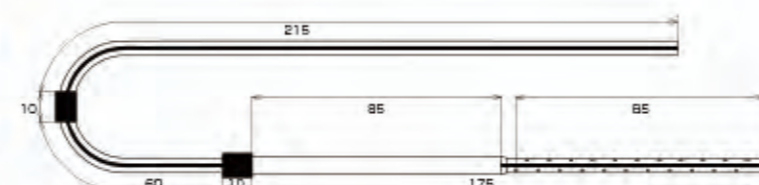

スワンネック型(逆U字) 補強部なし

製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217101	FS60 ロング 補強部無し	495mm	逆U字	無

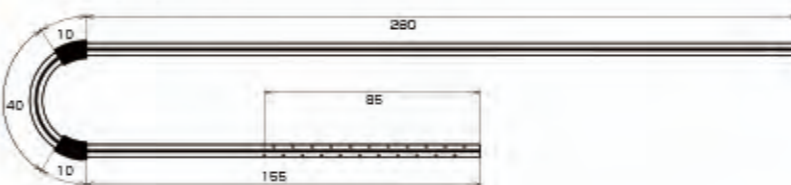

ストレート型


製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217201	FS800チューブ 2カフ80	800mm	ストレート	有



製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217202	FS800チューブ 3カフ60	800mm	ストレート	有




製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217203	FS ロングチューブ	800mm	ストレート	有

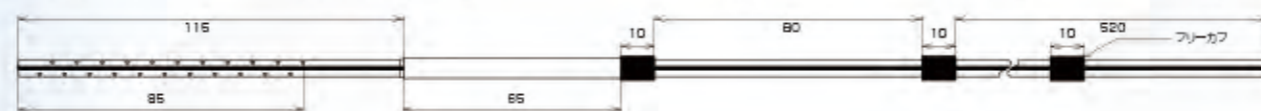


製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217005	FS600U 3カフ130	600mm	逆U字	有



製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217006	FS510U 2カフ100	510mm	逆U字	有

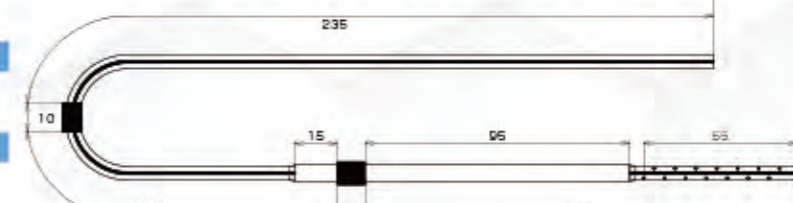

製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217007	FS540U 2カフ130	540mm	逆U字	有

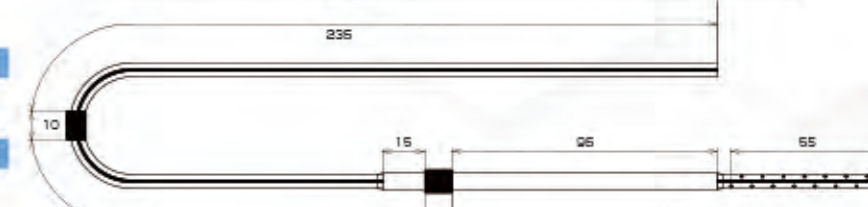

製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217204	FS650チューブ 3カフ100	650mm	ストレート	有



製品番号	呼称	全長	形状	補強部
5217205	FS800 3カフ80フリー 補強ロング	800mm	ストレート	有

