




注入

新規格より口径が大きくなる事で抵抗が減り、粘度が高いものを注入する際の負担を軽減できます。

減圧

新規格より口径が大きくなる事で抵抗が減り、減圧時に胃内の注入物を一緒に引いてきてしまった場合の詰まり軽減になります。

紫色コネクタ 新規格
水色コネクタ 新規格に接続可能なISO80369-1規格
黄色コネクタ 旧規格

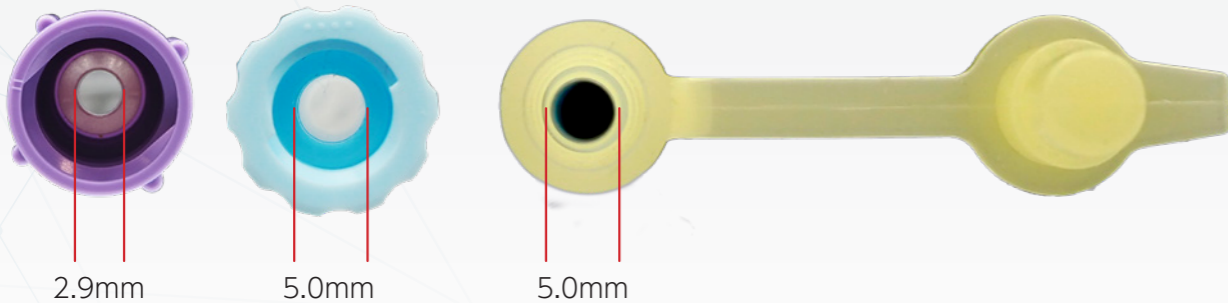

ファイコン栄養用変換コネクタ I



製品番号	製品名
5192975	ファイコン栄養用変換コネクタI

包装単位:5本/箱 滅菌済 単回使用
販売名:ファイコン栄養用変換コネクタ I
医療機器届出番号:07B1X10001000044


※各製品の使用上の注意に関しては、右記QRコードより電子添文にてご確認ください。



1タイプ(水色コネクタ製品)はISO80369-3規格に接続可能な大口徑シリーズの富士システムズ製再販製品名です。



発売元
富士システムズ株式会社
<http://www.fujisys.co.jp/>

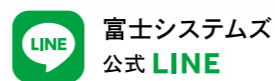

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
札幌支店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2
仙台支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-2
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-14
名古屋支店 〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6
大阪支店 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-3-5
広島支店 〒730-0015 広島市中区橋本町10-10
福岡支店 〒812-0038 福岡市博多区紙園町1-40

TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907
TEL (011) 211-0751 FAX (011) 211-0783
TEL (022) 748-4201 FAX (022) 748-4204
TEL (048) 729-6480 FAX (048) 644-9004
TEL (03) 5689-1901 FAX (03) 5689-1907
TEL (052) 265-9221 FAX (052) 265-9225
TEL (06) 6943-8404 FAX (06) 6943-1425
TEL (082) 555-8091 FAX (082) 227-4255
TEL (092) 262-6777 FAX (092) 262-6770

なめらか定食 はホリカフーズ株式会社の登録商標です。

(F-0325) A.2023年8月作成.SL

富士システムズは
胃ろうのお食事に
ミキサー食を
応援しています

ウェブサイト「やさしい胃ろうの食生活」
ではキザミ食のレシピを公開中!!




胃ろうのお食事(キザミ食)を
ご紹介しています。



大口徑変換コネクタ新登場

GB胃瘻バルーン I (水色コネクタ製品)と組み合わせてご使用いただけます

※写真はお粥です。

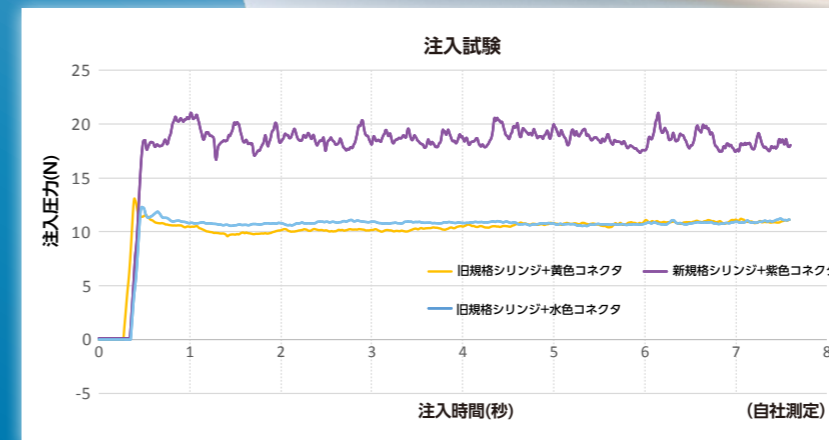

栄養注入を想定し、シリンジに入れたなめらか定食を
速度200ml/minで押しを押した時の圧力の変化

新規格シリンジ+新規格コネクタと
旧規格シリンジ+大口徑コネクタで
なめらか定食(ホリカフーズ社)を使
い注入圧を比較しました(当社比)。






黄色コネクタ製品 (旧規格)

黄色コネクタ胃瘻ボタン (旧規格大口径タイプ)


製品名: GB胃瘻バルーンボタン ラージボアタイプ
 サイズ: 14,16,18,20,22,24Frの6種類
 (それぞれ5~7種類のシャフト長設定あり)
 特徴: 水抜けしにくいGBバルーンを採用。
 黄色コネクタ(旧規格コネクタ)を具備したボタンタイプの
 大口径胃瘻デバイスです。
 販売名: GB胃瘻バルーンカテーテル
 医療機器認証番号: 220ADBZX00115000

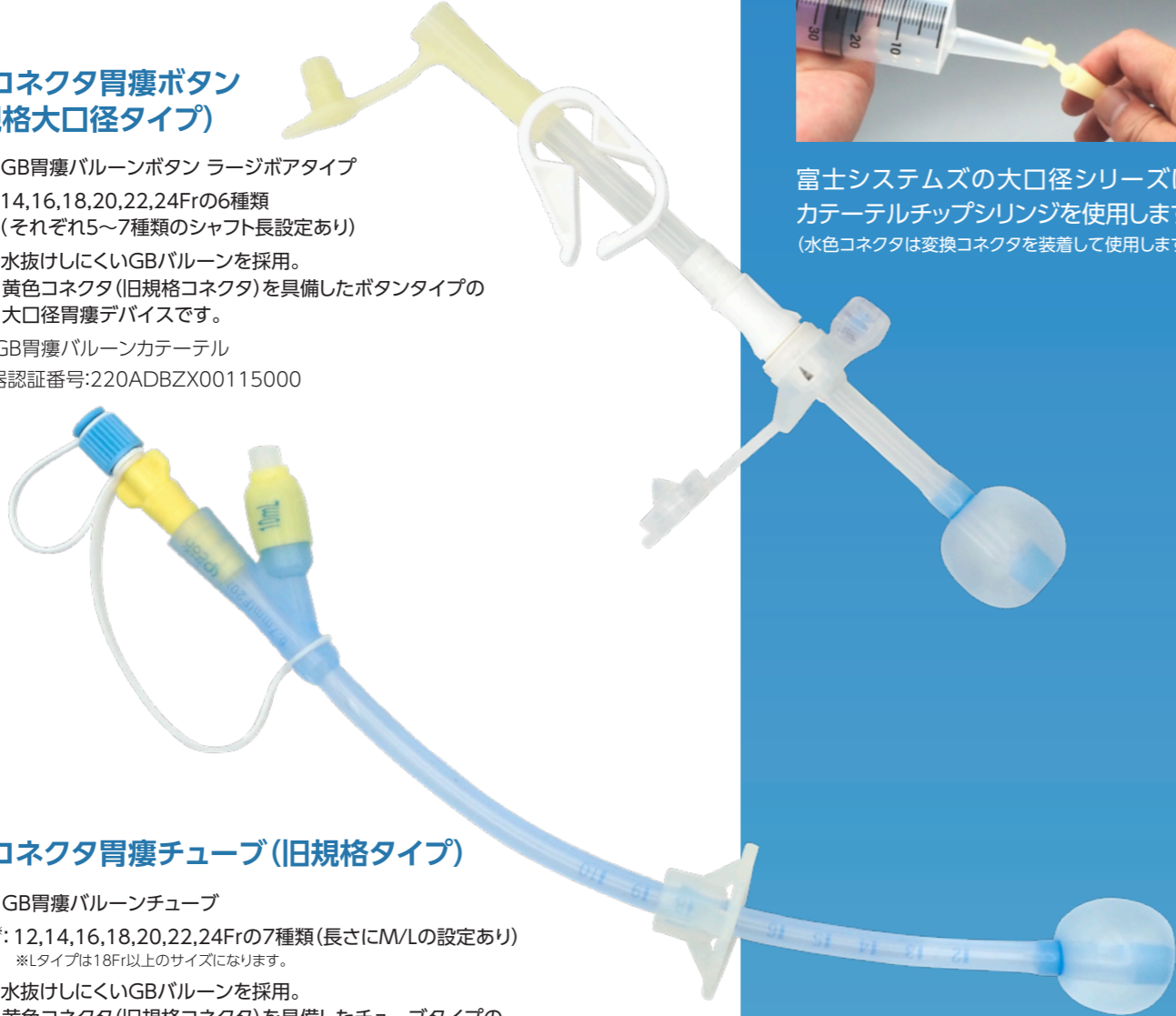

富士システムズの大口径シリーズは、
 カテーテルチップシリンジを使用します。
 (水色コネクタは変換コネクタを装着して使用します。)

黄色コネクタ胃瘻チューブ(旧規格タイプ)

製品名: GB胃瘻バルーンチューブ
 サイズ*: 12,14,16,18,20,22,24Frの7種類(長さにM/Lの設定あり)
 ※Lタイプは18Fr以上のサイズになります。
 特徴: 水抜けしにくいGBバルーンを採用。
 黄色コネクタ(旧規格コネクタ)を具備したチューブタイプの
 胃瘻デバイスです。
 販売名: GB胃瘻バルーンカテーテル
 医療機器認証番号: 220ADBZX00115000

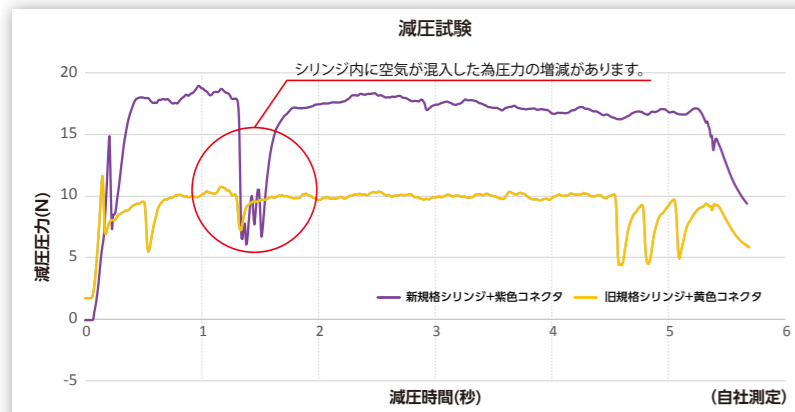

胃内減圧を想定し、ビーカーに移したなめらか定食の中にコネクタ
 先端を差し込み、速度480mL/minで押し子を引いた時の圧力の変化



試験使用食品
 なめらか定食
 牛肉すきやき
 (ホリカフーズ社)
 粘度21,600mPa・s
 品温20℃



Short

水色コネクタ製品 (ISO80369-3規格に接続可能なISO80369-1規格)

※写真は全て製品番号5192975ファイコン栄養用変換コネクタIを接続しています

水色コネクタ胃瘻チューブ (新規格に接続可能で折り畳み可能な大口径タイプ)

製品名: GB胃瘻バルーン フォールディングタイプ
 サイズ: 14,16,20,24Frの4種類
 特徴: 水抜けしにくいGBバルーンを採用。
 折り畳みが出来る短いチューブが特徴の
 水色コネクタ(新規格へ接続可能なコネ
 クタ)を具備したチューブタイプの
 大口径胃瘻デバイスです。
 販売名: 胃瘻バルーンカテーテル I
 医療機器承認番号: 30100BZX00256000

水色コネクタ胃瘻ボタン(新規格に接続可能な大口径タイプ)

製品名: GB胃瘻バルーンボタン(ラージボア I)
 サイズ: 14,16,18,20,22,24Frの6種類
 (それぞれ5~7種類のシャフト長設定あり)
 特徴: 水抜けしにくいGBバルーンを採用。
 水色コネクタ(新規格へ接続可能なコネクタ)を
 具備したボタンタイプの大口径胃瘻デバイスです。
 販売名: 胃瘻バルーンカテーテル I
 医療機器承認番号: 30100BZX00256000

水色コネクタ胃瘻チューブ(新規格に接続可能な大口径タイプ)

製品名: GB胃瘻バルーンチューブI
 サイズ*: 12,14,16,18,20,22,24Frの7種類(長さにM/Lの設定あり)
 ※Lタイプは18Fr以上のサイズになります。
 特徴: 水抜けしにくいGBバルーンを採用。
 水色コネクタ(新規格へ接続可能なコネクタ)を具備した
 チューブタイプの大口徑胃瘻デバイスです。
 販売名: 胃瘻バルーンカテーテル I
 医療機器承認番号: 30100BZX00256000

Long

