

器74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000

ファイコン 栄養用変換コネクタ I

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- 1) 本品の大口径メスコネクタはIS080369シリーズに規定されている小口径コネクタとは異なる設計の代替小口径コネクタであるため、他の代替小口径コネクタとの間で誤接続が起こる可能性があることに注意すること。


【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、IS080369-3との接続が可能な大口径コネクタと旧規格コネクタの相互接続を目的としたコネクタである。
2. 大口径メスコネクタ(患者側端)は、ISO 80369-3と接続可能なISO誤接続防止コネクタのオスコネクタと接続できる。
3. メスコネクタ(注入側端)は、平成12年8月31日医薬発第888号の別添2「経腸栄養ラインの接続部に関する基準」に適合するオスコネクタと接続できる。

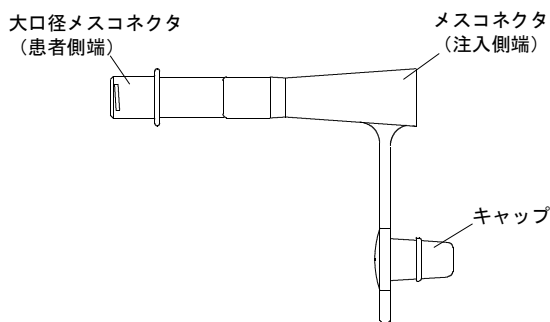

〈材質〉

各部の名称	原材料
大口径メスコネクタ(患者側端)	ポリプロピレン
メスコネクタ(注入側端)	シリコンゴム

本品はラテックスフリーである。

〈原理〉

本品を介することで、平成12年8月31日医薬発第888号の別添2「経腸栄養ラインの接続部に関する基準」に適合するオス接続部(先端部の直径 6.0 ± 0.5 mm、長さ15mm以上、テーパ $125 \pm 25 / 1000$)を具備する栄養投与セット等と、ISO 80369-3:2016に示されるオス小口径コネクタとの接続が可能である。

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤等を投与する器具である。

【使用方法等】

1. 一般的使用方法

- 1) 滅菌包装より丁寧に取り出し破損等がないことを確認する。
- 2) 留置されている(又は留置する)IS080369-3に適合したオスコネクタを具備する栄養カテーテル等に、本品の大口径メスコネクタ(患者側端)を接続する。
- 3) 栄養投与セット等の医薬発第888号に対応したオスコネクタに、本品のメスコネクタ(注入側端)を接続する。
- 4) 本品から栄養投与セット等を取り外した後、必要に応じてキャップを閉じる。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 本品を経腸栄養投与セット等に接続する際は、過度な締め付けを行わないこと。[本品が外れなくなったり、本品が破損するおそれがある]
- 2) 栄養剤や薬液の投与、又は減圧を行う際は、メスコネクタ(注入側)よりキャップを取り外すこと。
- 3) メスコネクタ(注入側)は、栄養剤の投与時や減圧時以外閉じておくこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 接続部に栄養剤等が可能な限り付着しないように注意すること。[接続部に緩みが生じるおそれがある]
- 2) 本品の接続部に栄養剤等が残留した場合は別売の洗浄ブラシ等を用いて洗浄すること。また、洗浄しても接続部に栄養剤等が残留する場合は交換すること。[栄養剤等の残渣は、接続不良や栄養剤等の漏れの原因となる]
- 3) 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。
[自己認証による]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。

2. 有効期間

使用期限は製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社

TEL 03-5689-1927